

AMICOBOR[®] soluzione acquosa

SPRAY AURICOLARE SOLUZIONE ACQUOSA - ACIDO BORICO al 3%

AMICOBOR

è uno spray auricolare per rimuovere impurità presenti nell'orecchio attraverso un'azione meccanica.

AMICOBOR

crea una barriera difensiva nei confronti di agenti patogeni esterni.

COMPOSIZIONE:

Acqua Depurata, Glicerolo, Acido Borico, Sodio Idrossido, Sodio Benzoato, Potassio Sorbato, Fenossitanolo.

CONSIGLI PER L'USO:

Portare l'erogatore all'ingresso della cavità dell'orecchio e premere 1 o 2 volte fino a farne uscire la quantità desiderata. Inclinare leggermente la testa durante l'applicazione. Ripetere l'operazione secondo necessità o secondo prescrizione medica.

AVVERTENZE:

Non ingerire.

Rimuovere eventuali apparecchi acustici prima di utilizzare AMICOBOR

Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso di contatto accidentale lavare gli occhi con abbondante acqua.

Tenere fuori della portata dei bambini.

Pulire accuratamente l'erogatore dopo l'utilizzo. Richiudere il flacone dopo l'uso.

Conservare a temperatura ambiente. Non esporre a fonti di calore.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Non utilizzare in caso di timpano perforato o di terapia farmacologica concomitante.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. Se ne sconsiglia l'uso in gravidanza.

Non utilizzare se allergici o ipersensibili ad uno dei componenti.

Qualora il prodotto dia luogo a fenomeni di sensibilizzazione, interrompere il trattamento e consultare il medico.

Prima di utilizzare su bambini consultare il medico al fine di una corretta diagnosi.

Non utilizzare nel caso in cui il confezionamento non si presenti integro.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

Confezione: Flacone da 100 ml



**LEVANTE**



FARTO s.r.l. Viale A. Guidoni, 97 - 50127 Firenze

Concessionario esclusivo di vendita: **Levante srl** Via dei Caboto, 49 - 50127 Firenze