



Dispositivo Medico **CE**

Brevetto n° 102019000007425

**OTOSCUDO è una pellicola adesiva monouso per la protezione dell'orecchio, composta da un film adesivo in poliuretano.**

È indicata per proteggere il padiglione auricolare di pazienti con patologie infettive e/o infiammatorie a carico dell'orecchio esterno e dell'orecchio medio con o senza perforazione della membrana timpanica, in caso di decorso post-operatorio oppure in soggetti portatori di protesi acustiche o con drenaggio trans-timpanico.

**OTOSCUDO** riproduce la forma del padiglione auricolare con una configurazione che lo rende bilaterale, ossia applicabile indifferentemente in corrispondenza dell'orecchio destro o sinistro.

È realizzato in tre strati: il film adesivo, uno strato di copertura applicato sulla faccia non adesiva del del film protettivo, uno strato di rilascio da rimuovere disposto a contatto con la faccia adesiva per permettere un rilascio agevolato di **OTOSCUDO** al momento dell'applicazione.

Grazie alle caratteristiche del film adesivo in poliuretano **OTOSCUDO** è:

**TRASPARENTE:** la pellicola adesiva che viene applicata sull'orecchio è trasparente ed esteticamente quasi invisibile.

**IMPERMEABILE:** la pellicola adesiva protegge l'orecchio dall'esposizione all'aria e all'acqua come, ad esempio, in caso di bagni in mare, docce, nuoto e, più in generale, durante attività ludico-sportive all'aperto.

**TRASPIRANTE:** la pellicola è gas-permeabile. Ciò permette, con il passaggio dell'aria, di evitare fenomeni di condensa e di mantenere praticamente inalterata la capacità di udire voci e suoni con particolare beneficio per i portatori di protesi acustiche




**EARTRONIK s.r.l.** Viale Capitino, 28 - 03036 Isola del Liri (FR)


Concessionario esclusivo di vendita: **Levante srl** Via dei Caboto, 49 - 50127 Firenze

## LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'APPLICAZIONE

**È molto importante che la pellicola sia applicata nel modo corretto per evitare di far entrare acqua nell'orecchio.**

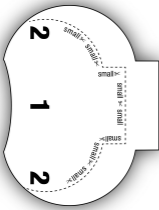


**1.** rimuovere la parte centrale (quella più grande) del copri-adesivo bianco (n. **1**);

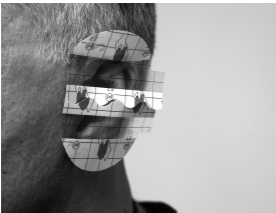

**2.** tenere la pellicola dalle due estremità che hanno il copri-adesivo residuo (n. **2**) con le dita di entrambe le mani. Applicare la pellicola sull'orecchio tenendola tesa, facendo coincidere la parte con copri-adesivo n. **2** superiore sulla parte alta del padiglione auricolare e la parte n. **2** inferiore sul lobo.

Una volta che la parte centrale della pellicola aderisce bene, rimuovere le due parti di copri-adesivo ancora presenti sulla pellicola, assicurandosi che tutta la superficie aderisca all'orecchio;

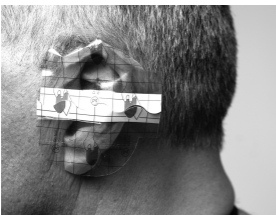

**3.** rimuovere le due parti trasparenti quadrettate in verde di supporto alla pellicola, facendo attenzione a non farla staccare dall'orecchio. Si consiglia di mantenere la pellicola ferma, schiacciando metà di essa mentre si rimuove l'altra metà di supporto e viceversa;



**4.** una volta rimosso tutto il supporto, assicurarsi che ogni parte della pellicola aderisca bene, premendola sull'orecchio.